

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Potence de lit
Comfort Lift



Bedding Group

Ce manuel décrit l'installation d'un support de potence de lit sur un modèle Comfort Lift.

Il n'est pas possible de combiner cette potence de lit avec un lit muni d'une tête de lit.

En utilisant ce support, la potence de lit peut être montée aussi bien du côté gauche que du côté droit à l'arrière du Comfort Lift tandis que la poignée sera suspendue au milieu au-dessus du lit.

Placez la position du lève-lit dans la position la plus basse afin de pouvoir travailler en toute sécurité.


Placez le dossier réglable dans la position la plus haute pour accéder plus facilement au châssis du côté de la tête de lit.

Retirez le boulon et la douille des deux côtés du châssis du lit (voir la photo ci-dessous)



Glissez le support le plus profondément possible dans les profilés du châssis.


Veillez à ce que l'entaille du bras de support gauche et droit (voir la photo ci-dessous) soit à la même hauteur que la position des boulons des deux côtés du châssis.

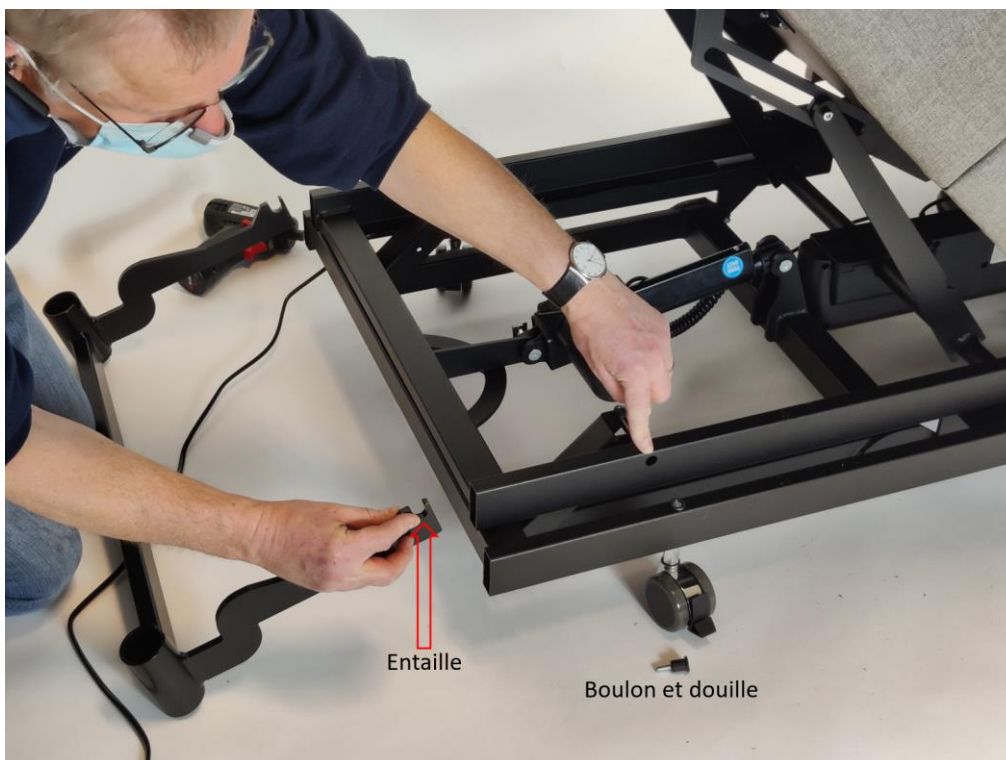

Revissez le boulon et la douille des deux côtés du châssis.



Vous pouvez maintenant placer la barre de la potence de lit comme vous le souhaitez, à gauche ou à droite du lit.

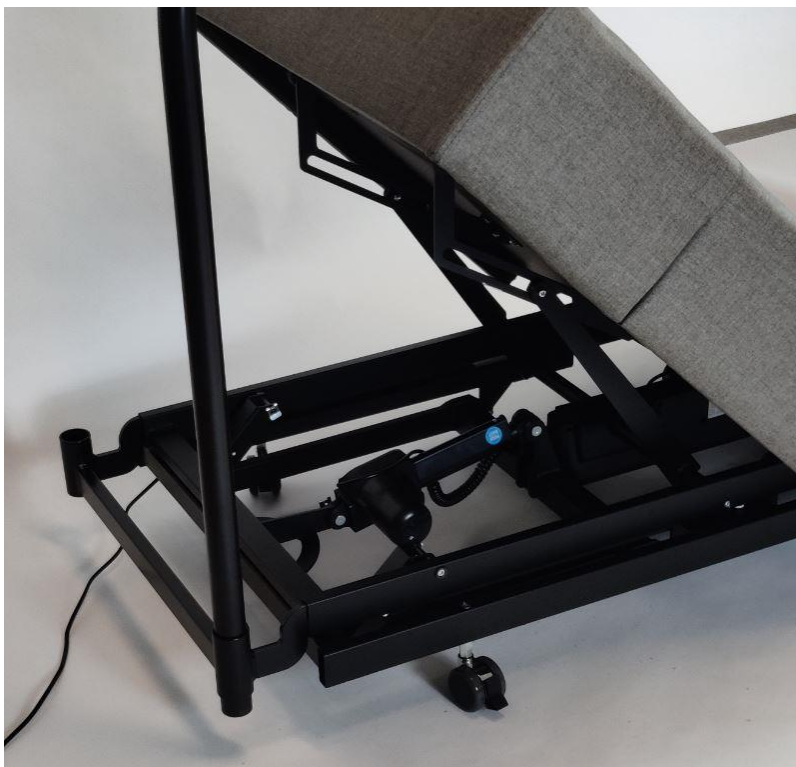

Montez la potence de lit au-dessus de la barre de la potence de lit.



Le support de la potence de lit est fixé sur le châssis supérieur du Comfort Lift. Ainsi, il se déplace en même temps que le box.